

ヘアグロー S[®] Hair Grow

《ヘア用エステマシン》 使用方法



JAPAN GALS co.,ltd.

モード選択ボタンの流れ

イオン/バイブレーション

ION/VIB表示ランプ(赤)点灯



EMS・弱

EMS表示ランプ(赤)点灯



EMS・中

EMS表示ランプ(赤)点滅(遅)




EMS・強

EMS表示ランプ(赤)点滅(速)




電源OFF


EMS表示ランプ消灯

《クレンジング・イオン導入》 


- ①モード選択ボタンを1回押す
イオン/バイブレーション機能がスタートします。

《EMSマッサージ・弱》 

- ②モード選択ボタンを2回押す
イオン/バイブレーション機能が終了し、
EMS機能の出力[弱]がスタートします。

《EMSマッサージ・中》 

- ③モード選択ボタンを3回押す
EMS機能の出力[中]に変更されます。

《EMSマッサージ・強》 

- ④モード選択ボタンを4回押す
EMS機能の出力[強]に変更されます。

⑤モード選択ボタンを5回押す 

- EMSランプが消灯して、電源がOFFになります。

遠赤外線ライト

ライト部点灯

※全てのモードに遠赤外線機能をご使用頂くことができます。

- ①ライトON/OFFボタンを1回押す
ライトが点灯します
- ②ライトON/OFFボタンをもう1回押す
ライトがOFFになります